


シリンジの目盛り合わせの留意点

ヘンケジェクト ディスポシリンジ2ml (3ml) は、目盛り合わせ位置に注意が必要です。

正しい目盛り合わせ

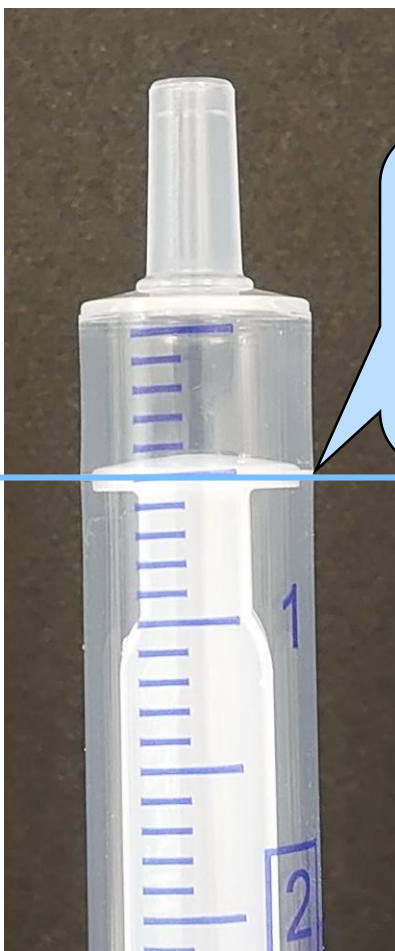


外筒とプランジャーが密着している部分を採取したい量の目盛に合わせてください。

(大阪ケミカル (株) 確認済)



正しい目盛り合わせ位置

誤った目盛り合わせ

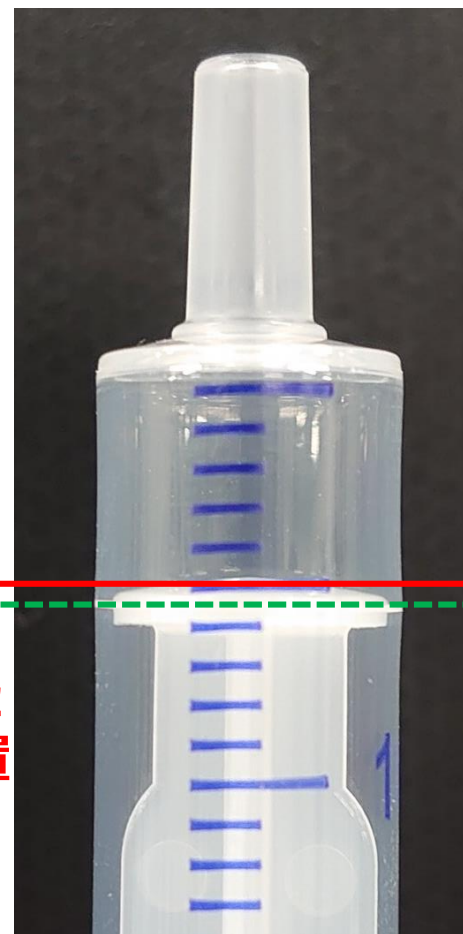

誤った目盛り合わせ位置

実際の採取量

1本あたり薬液を多く秤取することになり、結果的に10本分の採取が困難になります。